

memö

Вашему вниманию предлагается детская ортопедическая обувь MEMO. Ее важная отличительная особенность – программа контроля, профилактики и активного лечения дефектов стопы.



Довольно часто у детей дошкольного и школьного возраста можно встретить различные заболевания и деформации ног. Неопытные родители не могут понять, что же происходит с ножками их чада. В таких случаях консультация ортопеда поможет решить эту задачу.

Для начала установим разницу, найдя отличия между вальгусом и варусом. Варус - это деформация ступни, вследствие которой идет больший упор на внешние части стоп.

Варусное и вальгусное отклонения



ПРОВЕРЬТЕ, ПРАВИЛЬНАЯ ЛИ УСТАНОВКА КОЛЕНЕЙ У ВАШЕГО РЕБЕНКА

правильная установка вальгусная пятка варусная пятка



Если не лечить варус, то в перспективе ноги ребенка будут напоминать "О". Варусную деформацию стоп можно определить и самостоятельно, посмотрев на обувь ребенка. Если внешние края стерты - это варус. Прогрессирующий варус, ровно как и вальгус, постепенно увеличивает угол изгиба. Варусные стопы - это серьезная проблема. Но она поддается лечению, разумеется, при своевременном обращении к ортопеду и добросовестном отношении родителей.

Теперь рассмотрим подробнее аналогичную варусу, вальгусную деформацию стопы. Изменения происходят в этом случае с точностью до наоборот: больший упор при ходьбе идет на внутренние края стопы. Этот вид деформации стоп, подобно варусной деформации, искривляет и сами ноги. При халатном отношении к данной проблеме ноги ребенка вскоре станут Х-образными. Но и эти деформации можно устранить благодаря вовремя организованному походу к ортопеду. Самостоятельно вальгус можно определить по тем же кроссовкам или другой обуви, которую регулярно носит ребенок. Если внутренние края стерты - скорее всего, это вальгусная деформация стоп. Этот диагноз не менее серьезен, чем варус, но и он также поддается лечению.

Лечатся эти деформации комплексом из различных процедур. Основные из них - массаж, назначенный ортопедом, электрофарез, обертывания парафином (эту процедуру следует проводить только по назначению врача), различные упражнения и специальная ортопедическая обувь с высоким супинатором, которую малышу необходимо будет носить постоянно. Комплекс упражнений и процедур назначаются индивидуально и только после личного осмотра в больнице.

ЧТО ТАКОЕ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

memö?

Mdh Sp. z.o.o. разработали подошву MEMO (из термокаучука), внутри которой встроен каблук Томаса – продлённый с внутренней стороны подошвы, т.е. его внутренняя часть длиннее наружной. Это позволяет укрепить подошву под средней частью стопы и препятствует заваливанию стопы внутрь (что обычно наблюдается при вальгусной постановке). Подошва поделена на 6 пронумерованных зон, позволяющих контролировать состояние ступней ребенка. В течение 14-ти дней носки обуви наблюдаем за стиранием выпуклых шипов на каблуке и подошве. Существует 6 возможных вариантов, диагностирующих состояние ступней ребенка и определяющих соответствующие меры с Вашей стороны:



Стирание зоны 1: зона нормы – здоровая стопа. Обувь выполняет профилактически-контрольную функцию.

Стирание зоны 2: зона риска – угроза дисфункции (аномалия, болезнь). Для ходьбы необходимо использовать стельку серого цвета. Обувь нужно носить постоянно. После использования серой стельки стирание должно вернуться в зону нормы (№1). Если эффект будет отрицательным, необходимо поменять серую стельку на оранжевую. Если и в этом случае стирание не вернется в зону нормы, в срочном порядке обратитесь к врачу.

Стирание зоны 3: зона дисфункции – наличие дефекта ступней и/или коленей. Для ходьбы необходимо использовать стельку оранжевого цвета. Обувь нужно носить постоянно. После использования серой стельки стирание должно вернуться в зону нормы (№1). Если эффект будет отрицательным, рекомендуем обратиться к врачу.

Стирание зоны 3 и 4: зона серьезной дисфункции – наличие дефекта ступней и/или коленей. Для ходьбы необходимо использовать оранжевую стельку и носить обувь постоянно. Обязательна медицинская консультация.

Стирание зон 5 и 6: зоны серьезной дисфункции – необходима медицинская консультация.

MEMO

детская ортопедическая -профилактическая обувь



Защита стопы и ее правильная фиксация
Термостатический жесткий задник (и подносок)



Фиксация обуви при различной полноте стопы
Плавно регулируемые застежки



Особый комфорт
Обувь изготовлена полностью из натуральной мягкой кожи 1 сорта, в области голеностопного сустава дополнительная паралоновая вставка



Антишоковая система
Двухслойная стелька сделана из натурального сырья и покрыта паралоном для амортизации внешних воздействий



Охрана формы обуви
Укрепление носочной части

Профилактика плоскостопия
Специальный ортопедический каблук Томаса Укрепляет подошву под средней частью стопы и препятствует заваливанию стопы внутрь



Динамичный диагноз стопы
Диагностическая подошва



Удобство при ходьбе
Нескользящая подошва, сгибающаяся в месте перегиба стопы и широкая в области пальчиков



Возможность индивидуального подбора стелек
Система стелек Мемо

V-TECH
UNIQUE ASSEMBLY TECHNOLOGY

Правильное положение ступни во время ходьбы
Благодаря специальной системе монтажа V-tech



medort.ru

www.medort.ru



МОДЕЛИ **memo**

НА ПЕРВЫЕ ШАГИ

Обувь MEMO на первые шаги имеет подошву стартер (с встроенным внутри каблук Томаса) без разделения на зоны стирания. Она способствует правильной постановке и формированию стопы в раннем возрасте.

Размерный ряд: 18-21

БАМБИ



ФРАНКЛИН



ДИНО



ФИОНА



МОДЕЛИ

metö

НИЗКИЙ БЕРЕЦ

Размерный ряд: 22-31

ЯСПИС



ШАФИР



МОДЕЛИ **memo**

НИЗКИЙ БЕРЕЦ

Размерный ряд: 30-38

ТЕМИДА



СИНДИРЕЛЛА





МОДЕЛИ **meto**

ВЫСОКИЙ БЕРЕЦ

Размерный ряд: 22-31

АТЕНА



ВИКИ



ВИКТОР



ВИРТУС



ПРИНЦЕССА



АПОЛЛО

(+бежевый
и какао-бежевый цвет)



БЕЛЛОНА



ГЕЛИОС: размерный ряд 30-38



МОДЕЛИ с **medo** БОТИНКИ

Размерный ряд: 22-29

КАРАТ



Размерный ряд: 30-38

РЕГБИ



ПОЛЛО



ДЖОГГИНГ



**все модели ботинок имеются в
утепленном варианте: утепление –
искусственный мех*

СТЕЛКИ **memo**

Размерный ряд: 22-38



Оранжевые стельки MEMO обеспечивают корытообразную супинацию.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: при искривлении стоп, плоскостопии, искривлении колен.
Длина стельки – $\frac{3}{4}$, супинация – 10 мм.
Стельки поддерживают свод стопы снизу, сбоку и сзади.



Серые стельки MEMO обеспечивают клиновидную супинацию.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: при плоскостопии.
Супинация пяты – 5 мм. Размеры стелек совпадают с размерами обуви MEMO.





БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Менеджер отдела продаж - Титорова Наталья

тел. 8(83130)97559, 8(930)808 9185

e-mail: ntitorova@inbox.ru

skype: Natalia242020

ICQ 697650505

medort.ru