

АЛМАГ-01



ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОВИЗОРОВ



Виды физиотерапевтического воздействия

Все портативные физиотерапевтические аппараты компании ЕЛАМЕД можно разделить на группы

- Магнитотерапевтические**
- Тепловые**
- Криво-оборудование**
- Электростимуляторы**
- Приборы комбинированного воздействия.**

Алмаг-01 – магнитотерапевтический аппарат, в котором применяется бегущее импульсное магнитное поле (БИМП)



- Уникальное магнитное поле Алмага-01 попадает в диапазон биологических ритмов организма человека (что позволяет лечить заболевания различных систем и органов)
- Глубина проникновения бегущего импульсного магнитного поля Алмага-01 - до 8 см (что делает возможным лечение крупных суставов и внутренних органов)
- Гибкая конструкция Алмага-01 позволяет учитывать при проведении процедуры все анатомические особенности тела.

- 4 катушки-излучателя,



- электронный блок,

- индикатор магнитного поля

(важно! – индикатор не излучает магнитное поле, а только показывает его наличие с северной стороны)

1

Раскрывая дополнительные капилляры и влияя на нарушенное кровообращение, увеличивает циркуляцию крови в несколько раз.

К больному органу поступает больше кислорода и питательных веществ,

2

а вредные вещества выводятся быстрее. Рассасывает отеки и припухлости.

3

Активирует противосвёртывающую систему крови, улучшает её

текучесть, что благоприятно сказывается на кровообращении организма.

4

Усиливает внутриклеточный и межклеточный обмен веществ,

способствуя восстановлению нарушенных функций организма.

5

Влияет на адаптационные возможности организма и клеточное звено

иммунитета, стимулируя защитные системы организма и препятствуя

прогрессированию заболевания.

Понижает чувствительность периферических нервных рецепторов

- **Снимает боль, отек и воспаление.**

- **В составе комплексного лечения усиливает эффективность лекарственной терапии**

- **Нормализует артериальное давление.**

- **Восстанавливает подвижность суставов и позвоночника, увеличивает дальность безболевого ходьбы.**

АЛМАГ-01

Применяется при лечении:



- Артроза, артрита, остеохондроза позвоночника, в т.ч.

- осложненный грыжей

- Переломов, вывихов, растяжений

Заболеваний сердечно-сосудистой системы

- **Онкология**
- **Системные заболевания крови**
- **Тиреотоксикоз**
- **Острые гнойно-воспалительные заболевания**

Наличие имплантируемого

АЛМАГ-01

Применение аппарата:



- В инструкции «Опыт применения» подробно расписана методика проведения лечения каждого заболевания: как и куда накладывать, сколько проводить процедур

- Средняя продолжительность 1 процедуры 20 мин

- Накладывать аппарат на зону воздействия нужно «северной» стороной (обозначенной буквой N)

- Курс лечения большинства заболеваний – 18 процедур. Внутри курса (через каждые 6 дней)

1. Доход аптеки от продажи Алмага-01 одному покупателю равен доходу от продажи лекарственных препаратов 40 покупателям
2. Увеличение стоимости среднего чека
3. Возможность дополнительных продаж (вместе с лекарственными препаратами и парафармацевтикой)
4. Увеличение объема продаж Алмаг-01 в вашей аптечной сети ведет к увеличению её упоминания в нашей региональной рекламе, а, значит, повышает её известность и общий поток покупателей.

1. Клинически доказанная эффективность (Алмаг-01 есть почти во всех больницах и поликлиниках страны)
2. Эффективное лечение широкого спектра нозологий
3. Возможность проведения физиопроцедур в домашних условиях. Особенно важно соблюдать правило приема процедур в положении лежа при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата для исключения нагрузки на суставы
4. Возможность лечения всем членам семьи
5. Простота и безопасность эксплуатации

1. Высокая цена аппарата

- Для лечения хронических заболеваний (Артрит, артроз, гипертония, остеохондроз) требуется периодическая курсовая терапия, а значит и Алмаг-01 будет использоваться множественно
- Для восстановления после полученных травм, а также после перенесенных операций требуется получение физиопроцедур. Алмаг-01 дает возможность делать это эффективно в максимально комфортных условиях
- У алмага-01 в показаниях к применению более 70 нозологий – подходит для всех членов семьи

2. Поможет или нет?

Алмаг-01 эффективен и обязательно поможет

- **Время получения ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО результата от применения Алмага-01 зависит от:**
 - **Степени заболевания**
 - **Сложности заболевания**
 - **Состояния и особенностей организма**
- **Эффективность Алмага-01 подтверждает его наличие и применение в больницах, поликлиниках и санаториях.**
- **Алмаг-01 выпускается более 15 лет. За это время жалоб от покупателей и возвратов аппарата не**

АЛМАГ-01

**ЛПУ , в которых применяется
аппарат**

1.

АЛМАГ-01

Ближайшие сервисные центры

Г.

- 1. Алмаг-01 эффективно лечит широкий спектр заболеваний за счет оказания противовоспалительного, обезболивающего, противоотечного действия, это – физиокабинет на дому**
- 2. Алмаг-01 удобен и прост в применении и подходит для лечения людей разных возрастных групп**

3. Алмаг-01 применяется при лечении заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата (артрит, артроз, остеохондроз), заболеваний сердечно-сосудистой системы.

4. Гарантийный срок обслуживания на аппарат Алмаг-01 3 года.

5. Доход аптеки от продажи Алмага-01 одному покупателю равен доходу от продажи лекарственных препаратов 40 покупателям.

6. Реализация Алмага-01 делает возможными дополнительные продажи.

7. Телефон горячей линии завода

8 800 000 01 10

