

#### Виды физиотерапевтического воздействия

# Все портативные физиотерапевтические аппараты компании ЕЛАМЕД можно разделить на группы

- Магнитотерапевтические
- □ Тепловые
- □ Крио-оборудование
- Электростимуляторы
- □ Приборы комбинированного воздействия.

#### Особенности аппарата

Алмаг-01 – магнитотерапевтический аппарат, в котором применяется бегущее импульсное



- Уникальное магнитное поле Алмага-01 попадает в диапазон биологических ритмов организма человека (что позволяет лечить заболевания различных систем и органов)
- □ Глубина проникновения бегущего импульсного магнитного поля Алмага-01 до 8 см (что делает возможным лечение крупных суставов и внутренних органов)
- □ Гибкая конструкция Алмага-01 позволяет учитывать при проведении процедуры все анатомические особенности тела.

#### Конструкция аппарата

АЛМАГ-01



# Как действует

#### АЛМАГ-01

- Раскрывая дополнительные капилляры и влияя на нарушенное кровообращение, увеличивает циркуляцию крови в несколько раз. К больному органу поступает больше кислорода и питательных веществ, а вредные вещества выводятся быстрее. Рассасывает отеки и припухлости.
  - **Активирует противосвёртывающую систему крови**, улучшает её текучесть, что благоприятно сказывается на кровообращении организма.
    - Усиливает внутриклеточный и межклеточный обмен веществ,
  - способствуя восстановлению нарушенных функций организма.
    Влияет на адаптационные возможности организма и клеточное звено иммунитета, стимулируя защитные системы организма и препятствуя прогрессированию заболевания.

#### Понижает чувствительность периферических нервных рецепторов

# Лечебный эффект

- Снимает боль, отек и воспаление.
- В составе комплексного лечения усиливает
- эффективность лекарственной терапии
- Нормализует артериальное давление.

Восстанавливает подвижность суставов и позвоночника, увеличивает дальность безболевой ходьбы.

#### Применяется при лечении:



- Артроза, артрита, остеохондроза позвоночника, в т.ч.
- осложненный грыжей

Переломов, вывихов, растяжений

Заболеваний сердечнососудистой системы

# Противопоказания к применению:

Онкология

Системные заболевания крови

Тиреотоксикоз

Острые гнойно-воспалительные заболевания

Напишие имппантируемого

#### Применение аппарата:



- В инструкции «Опыт применения» подробно расписана методика проведения лечения каждого заболевания: как и куда накладывать,
- сколько проводить процедур
- Средняя продолжительность 1 процедуры 20 мин
- Накладывать аппарат на зону воздействия нужно «северной» стороной (обозначенной буквой N)
  - Курс лечения большинства заболеваний 18 процедур. Внутри курса (через каждые 6 дней)

#### АЛМАГ-01 4 причины продать Алмаг-01

- 1. Доход аптеки от продажи Алмага-01 одному покупателю равен доходу от продажи лекарственных препаратов 40 покупателям
- 2. Увеличение стоимости среднего чека
- 3. <u>Возможность дополнительных продаж</u> (вместе с лекарственными препаратами и парафармацевтикой)
- 4. Увеличение объема продаж Алмаг-01 в вашей аптечной сети ведет к увеличению её упоминания в нашей региональной рекламе, а, значит, повышает её известность и общий поток покупателей.

#### 6 причин купить Алмаг-01

- 1. Клинически доказанная эффективность (Алмаг-01 есть почти во всех больницах и поликлиниках страны)
- 2. Эффективное лечение широкого спектра нозологий
- 3. Возможность проведения физиопроцедур в домашних условиях. Особенно важно соблюдать правило приема процедур в положении лежа при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата для исключения нагрузки на суставы
- 4. Возможность лечения всем членам семьи
- 5. Простота и безопасность эксплуатации

#### Работа с возражениями

#### 1. Высокая цена аппарата

- Для лечения хронических заболеваний (Артрит, артроз, гипертония, остеохондроз) требуется периодическая курсовая терапия, а значит и Алмаг-01 будет использоваться многократно
- Для восстановления после полученных травм, а также после перенесенных операций требуется получение физиопроцедур. Алмаг-01 дает возможность делать это эффективно в максимально комфортных условиях
- У алмага-01 в показаниях к применению более 70 нозологий – подходит для всех членов семьи

#### Работа с возражениями

#### 2. Поможет или нет?

#### Алмаг-01 эффективен и обязательно поможет

- Время получения ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО результата от применения Алмага-01 зависит от:
- □ Степени заболевания
- Сложности заболевания
- Состояния и особенностей организма
- Эффективность Алмага-01 подтверждает его наличие и применение в больницах, поликлиниках и санаториях.
- Алмаг-01 выпускается более 15 лет. За это время жалоб от покупателей и возвратов аппарата не

## ЛПУ, в которых применяется аппарат

1.

# Ближайшие сервисные центры

Γ.

#### Закрепим основные моменты

- 1. Алмаг-01 эффективно лечит широкий спектр заболеваний за счет оказания противовоспалительного, обезболивающего, противоотечного действия, это физиокабинет на дому
- 2. Алмаг-01 удобен и прост в применении и подходит для лечения людей разных возрастных групп

#### Закрепим основные моменты

- 3. Алмаг-01 применяется при лечении заболеваний и повреждений опорнодвигательного аппарата (артрит, артроз, остеохондроз), заболеваний сердечнососудистой системы.
- 4. Гарантийный срок обслуживания на аппарат Алмаг-01 3 года.

#### Закрепим основные моменты

- 5. Доход аптеки от продажи Алмага-01 одному покупателю равен доходу от продажи лекарственных препаратов 40 покупателям.
- 6. Реализация Алмага-01 делает возможными дополнительные продажи.
- 7. Телефон горячей линии завода

